




Schwangerschaftstest
Schnelle Erkennung

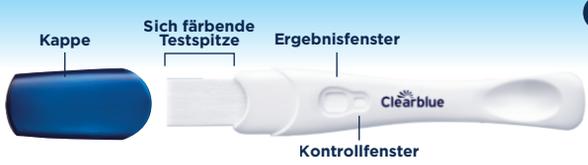

Für den Selbsttest. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie mit dem Testen beginnen.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein nicht automatisiertes Selbsttestgerät für den Heimgebrauch zum qualitativen Nachweis von humanem Choriongonadotropin (hCG) im Urin einer Frau zur Feststellung einer Schwangerschaft.¹ Zur Verwendung ab 4 Tagen vor Fälligkeit der Periode vorgesehen.²

Warnungen und Vorsichtsmassnahmen

Gebrauchsanweisung für das Gerät, mit dem Aufdruck «CB11012» auf der Verpackung. Für den Selbsttest zu Hause. Ausschliesslich zur Verwendung in der *In-vitro*-Diagnostik. Nicht zur inneren Anwendung. Nicht wiederverwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei 2 °C bis 30 °C aufbewahren. Bei Aufbewahrung im Kühlschrank vor der Verwendung mindestens 30 Minuten auf Raumtemperatur erwärmen lassen. Nicht verwenden, wenn die Folienverpackung beschädigt ist. Nach dem Öffnen der Folie sofort verwenden. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums anwenden. Entsorgung im normalen Hausmüll. Enthält Kleinteile. Keine Teile des Geräts verschlucken. Falls Teile des Geräts versehentlich verschluckt wurden, einen Arzt suchen. Melden Sie Clearblue jegliche Verletzung, die durch die Verwendung dieses Produkts verursacht wurde.

Über 99 % zuverlässig
ab dem Fälligkeitstag
Ihrer Periode

Einfach abzulesende Ergebnisse

Nehmen Sie vor dem Test nicht
übermässig viel Flüssigkeit zu sich.

Lesen Sie die Ergebnisse innerhalb von 10 Minuten ab.

1 Durchführung des Tests

Erforderliche Materialien (nicht im Lieferumfang enthalten): Sauberer, trockener Behälter und eine Stoppuhr. Entfernen Sie die Folienverpackung, nehmen Sie die Kappe ab und verwenden Sie den Test sofort. Halten Sie die sich färbende Testspitze **5 Sekunden lang**:



oder



WICHTIG: Die sich färbende Testspitze färbt sich sofort rosa und zeigt damit an, dass sie Urin aufnimmt. Dennoch MÜSSEN Sie die Spitze für volle 5 Sekunden in Ihren Urin halten.

WICHTIG: Tauchen Sie die Testspitze wie gezeigt vollständig ein.

Setzen Sie die Kappe wieder auf und legen Sie das Teststäbchen auf eine flache Unterlage. Färbt sich die Testspitze nicht vollständig rosa, lesen Sie den Abschnitt «Testfehler».

2 Warten



- Das Ergebnis «Schwanger» (+) kann innerhalb von 1 Minute angezeigt werden, wenn ab dem Tag der ausbleibenden Periode getestet wird (der Tag nach dem Fälligkeitstag Ihrer Periode).
- Warten Sie 3 Minuten, bis sich das Ergebnis «Nicht Schwanger» (-) bestätigt. Wenn keine blauen Linien erscheinen, lesen Sie den Abschnitt «Testfehler».

3 Ergebnisse

Schwanger - ist Ihr Ergebnis «Schwanger», suchen Sie Ihren Arzt auf (siehe Frage 1)

Nicht Schwanger (siehe Frage 2)

Bild A

Bild B

Bild C



Ergebnisfenster Kontrollfenster

Wenn Sie sich unsicher bezüglich des Ergebnisses sind, siehe Frage 6.

Eine blaue Linie muss im Kontrollfenster vorhanden sein, damit Ihr Ergebnis gültig ist. Wenn nicht, lesen Sie den Abschnitt «Testfehler». **WICHTIG!** Lesen Sie Ihr Ergebnis innerhalb von **10 Minuten** nach Durchführung des Tests ab. Ignorieren Sie jegliche Veränderungen nach dieser Zeit.

Frage und Antworten

- Mein Ergebnis lautet «Schwanger». Was soll ich tun?**
Suchen Sie Ihren Arzt auf und besprechen Sie das weitere Vorgehen. Es kann sein, dass das Testergebnis positiv ist, Sie später jedoch feststellen, dass Sie nicht mehr schwanger sind (siehe Frage 7).
- Mein Ergebnis lautet «Nicht Schwanger». Was bedeutet das?** Möglicherweise sind Sie nicht schwanger oder die Konzentration des Schwangerschaftshormons ist für einen Nachweis noch nicht hoch genug. Testen Sie in drei Tagen erneut. Wenn das Ergebnis dieses Tests ebenfalls «Nicht Schwanger» lautet und Ihre Periode immer noch nicht eingesetzt hat, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.
- Ich bin mir nicht sicher, wann der Fälligkeitstag meiner erwarteten Periode ist. Woher weiss ich, dass ich den Test zum richtigen Zeitpunkt mache?**
Um den Fälligkeitstag Ihrer Periode zu ermitteln, berechnen Sie Ihre gewöhnliche Zykluslänge, indem Sie die Tage vom ersten Tag Ihrer Periode bis zum Tag vor Ihrer nächsten Periode zählen. Wenn Sie unregelmässige Zyklen haben, sollten Sie den längsten Zyklus der letzten Monate abwarten, bevor Sie testen.
- Wie funktioniert Clearblue?** Nach der Probenaufnahme erkennt der Test hCG im Urin. Die visuellen Ergebnisse zeigen mit einer über 99%igen Zuverlässigkeit ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode an, ob hCG erkannt wurde.
- Kann die Einnahme von Medikamenten oder gesundheitliche Beschwerden das Ergebnis beeinflussen?**
Lesen Sie vor der Durchführung eines Tests grundsätzlich die Anweisungen des Herstellers des Medikaments durch, das Sie gerade einnehmen. Medikamente, die hCG enthalten, und bestimmte seltene Erkrankungen können zu falschen Positiv-Ergebnissen führen. Eileiterschwangerschaften oder eine kürzliche Schwangerschaft, auch wenn diese nicht ausgetragen wurde, können zu irreführenden Ergebnissen führen. Wenn Sie kurz vor oder in den Wechseljahren sind, können Sie ein falsches Ergebnis «Schwanger» erhalten, obwohl Sie nicht schwanger sind. Hormontherapien mit Clomiphencitrat, gängige Schmerzmittel, Alkohol, Antibiotika oder die Antibabypille sollten **KEINE** Auswirkungen auf den Test haben. Wenn Sie unerwartete Ergebnisse erhalten, sollten Sie Ihren Arzt kontaktieren.
- Was mache ich, wenn ich mir bei dem Ergebnis nicht sicher bin?** Für das Ergebnis «Schwanger» müssen innerhalb von 10 Minuten nach Testdurchführung eine blaue Linie im Kontrollfenster und ein Pluszeichen (+) im Ergebnisfenster erscheinen.
Ergebnisse «Schwanger»
Bild A: So kann es aussehen, wenn Sie schwanger sind und mehrere Tage nach dem Ausbleiben der Periode testen, da der hCG-Spiegel dann höher ist.
Bild B: So kann es aussehen, wenn Sie den Test um den Fälligkeitstag der Periode durchführen, da die hCG-Konzentrationen möglicherweise relativ gering sind.
Bild C: Diese Abbildung zeigt ebenfalls das Ergebnis «Schwanger».
Wenn die Linien im Ergebnisfenster ein Pluszeichen (+) bilden, lautet das Ergebnis «Schwanger», unabhängig davon, ob eine der Linien heller oder dunkler ist als die andere. Für das Ergebnis «Nicht Schwanger» müssen innerhalb von 10 Minuten nach der Durchführung des Tests eine blaue Linie im Kontrollfenster und ein Minuszeichen (-) im Ergebnisfenster erscheinen. Wenn Sie sich immer noch unsicher sind, ob das Ergebnis korrekt ist, warten Sie mindestens 3 Tage, bevor Sie erneut testen und halten Sie sich genau an die Gebrauchsanweisung.
- Zuerst wurde das Testergebnis «Schwanger» angezeigt, doch bei einem erneuten Test war das Ergebnis negativ oder ich habe meine Periode bekommen. Was bedeutet das?**
Es kann sein, dass das Testergebnis positiv ist, Sie später jedoch feststellen, dass Sie nicht mehr schwanger sind. Die Ursache hierfür kann ein früher Schwangerschaftsverlust sein, was nicht selten vorkommt und ungefähr bei 1 von 4 Schwangerschaften auftritt. Die meisten Frauen können anschliessend eine gesunde Schwangerschaft haben.
- Sollte ich irgendetwas tun, wenn ich eine Schwangerschaft plane?** Es ist eine gute Idee, mit Ihrem Arzt zu sprechen, bevor Sie versuchen, schwanger zu werden. Viele Ärzte informieren darüber, dass die Einnahme von Folsäure oder pränatalen Vitaminpräparaten, der Verzicht auf Alkohol und Nikotin sowie das Halten eines gesunden Körpergewichts sich positiv auswirken können. Sie können auch einen Ovulationstest anwenden, um festzustellen, wann Ihre fruchtbarsten Tage sind. Clearblue bietet eine Reihe von Produkten an, die Ihnen helfen, Ihre Chancen auf eine Empfängnis zu erhöhen.

! Testfehler

Die sich färbende Testspitze färbt sich nicht vollständig rosa.

Sie haben möglicherweise nicht genug Urin aufgetragen. Sie können jedoch sicher sein, dass der Test funktioniert hat, wenn die Kontrolllinie innerhalb von 10 Minuten nach dem Test erscheint.

Innerhalb von 10 Minuten nach dem Test erscheint keine blaue Linie im Kontrollfenster.

Der Test hat nicht funktioniert, möglicherweise weil zu viel oder zu wenig Urin verwendet wurde. Testen Sie erneut mit einem neuen Test und befolgen Sie dabei sorgfältig die Anweisungen.

Kontrollfenster

Ergebnisfenster



das hohe Konzentrationen dieser Substanzen die Leistung des Geräts nicht beeinträchtigen. Auch hohe Konzentrationen des Beta-Core-Fragments von hCG, sehr hohe Konzentrationen des intakten hCG, eine Reihe von spezifischen Dichten oder der pH-Wert des Urins hatten keinen Einfluss auf die Leistung. Eine Studie zur Untersuchung der Präzision hat gezeigt, dass die analytische Empfindlichkeit des Geräts 25 mIU/ml beträgt.

IVD	Medizinisches Produkt für die <i>In-vitro</i> -Diagnostik	LOT	Batch-Code
	Hersteller		Verfallsdatum
	Nicht wiederverwenden		Temperaturbegrenzung 2°C bis 30°C
EC REP	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft		

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genf, Schweiz.

Literatur

¹Perrier d'Hauterive S, et al. Gynecol Obstet Invest 2007; 64(3): 156–60.
²Grout C and Johnson S. Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2014; 74(7):661-669.

Clearblue ist eine Marke von SPD.
© 2023 SPD. Alle Rechte vorbehalten.

www.clearblue.com

Berater/innen sind Mo-Fr von 08:00 – 16:00 Uhr erreichbar, ausser an Feiertagen.

0800 102 865 Anrufe sind kostenlos.

Alle Anrufe werden aufgezeichnet und eventuell zur Qualitätskontrolle abgehört. Bitte halten Sie das Produkt und dessen Verpackungen, inklusive der Folienverpackung, bereit, wenn Sie uns anrufen.

Leistungsmerkmale

Klinische Leistung:

Klinische Leistungstests haben gezeigt, dass das Gerät mit einer Zuverlässigkeit von > 99 % den Schwangerschaftsstatus ab dem Fälligkeitstag der Periode bestimmt.

- Bei Anwendung durch Laien war das Gerät zu > 99 % zuverlässig, wenn es um ihren Schwangerschaftsstatus ging (getestet von 120 Frauen).
- In einer Studie, in der 600 Proben getestet wurden, war das Gerät ab dem Fälligkeitstag der Periode zu > 99 % zuverlässig.
- Klinische Tests der Spezifität mit prä-, peri- und post-menopausalen Proben (600 Proben) bestätigten eine Spezifität von > 99 %.

Analytische Leistung:

Die analytische Spezifität wurde durch Tests des Geräts mit potenziell störenden oder kreuzreagierenden Substanzen festgestellt. Die Ergebnisse bestätigten,